
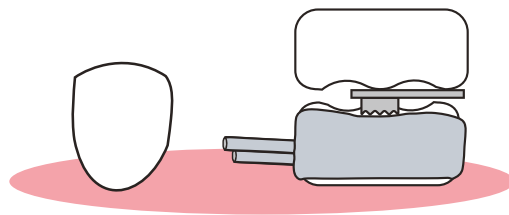


La pose, étape par étape



Quatre gestes pour un résultat fiable.

1 Adapter

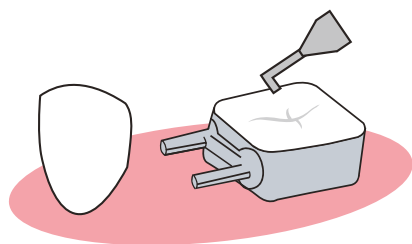




Choisissez la bande correspondant à la dent pilier. Elle doit s'adapter avec précision à la morphologie dentaire et résister à toute tentative de désinsertion. Un poussoir et/ou un positionneur de bande peuvent être utilisés pour faciliter l'ajustement et la mise en place sur la dent.

2 Mesurer, puis couper.

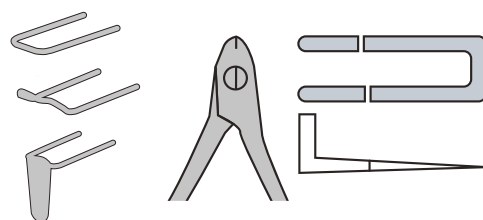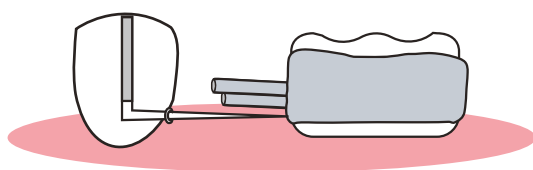



Mesurez la dimension mésio-distale de l'espace d'extraction et choisissez le type de boucle adapté. À l'aide d'une pince coupante ou d'une fraise turbine, ajustez la longueur de la boucle à la largeur de l'espace. Taillez une extrémité légèrement plus courte pour faciliter l'insertion dans les tubes — la tige doit s'y engager sur 2,5 à 3 mm, extrémité longue en premier.

3 Assembler et sécuriser.

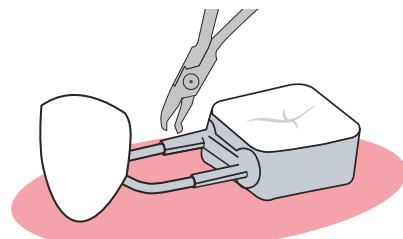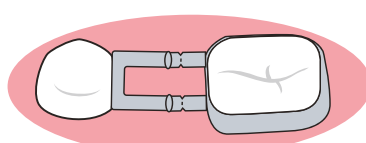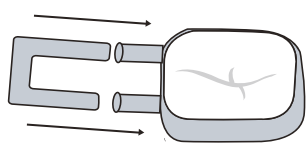

Remplacez le mainteneur en bouche et faites glisser la boucle jusqu'au contact de la dent pilier. Elle doit effleurer le point de contact proximal sans toucher la gencive. Une fois l'ajustement correct, serrez les tubes à 1,5 mm de leur extrémité ouverte avant de retirer de la bouche. Effectuez ensuite des sertissages circonférentiels supplémentaires sur les deux tubes pour sécuriser la tige et éliminer tout bord tranchant.

4 Sceller pour durer.

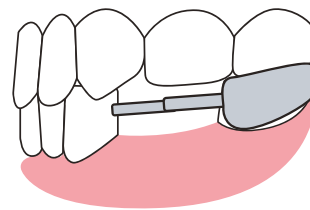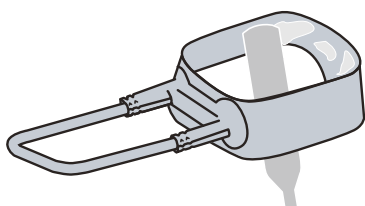

Déposez le ciment de scellement sur la face interne de la bande depuis le bord gingival. Mettez en place à l'aide d'un poussoir et/ou d'un dispositif de positionnement. Attendez la prise complète, puis éliminez les excédents.